



ERHEM sp.j.
39-200 Dębica
ul. Puzzkina 6
Phone./Fax. +48 14 6812380
e-mail: office@erhem.pl
www.erhem.pl
Poland

ERHEM



Návod na použití

Název produktu: DAFO Classic

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

- Ortézy, aparáty, korzety, stabilizátory, dlahy, skořepiny, pásky, límce a ortotické pomůcky jsou ortopedické výrobky nebo ortotická řešení.
- Jejich hlavním cílem je podpořit nebo nahradit přirozené motorické funkce končetin a trupu, ztracené v důsledku úrazu nebo vrozené vady.
- Ortopedické výrobky je nutné nosit, sundávat a používat v souladu s individuálním návodem k použití. Používejte je pouze k určenému účelu dle doporučení odborného lékaře.
- Instrukce k aplikaci poskytuje lékař nebo kvalifikovaný zdravotnický personál, ortopedický technik.
- Doba používání výrobku a způsob nastavení stabilizačních, korekčních, imobilizačních nebo odlehčovacích prvků musí být striktně vázány na typ dysfunkce a určeny lékařem.
- Pokožka v oblasti kontaktu ortézy musí být bez viditelných změn (oděrka, modřina, popálenina, rána, trofické změny, ekzém).
- Pokud je nutné výrobek používat i při výše uvedených změnách, musí být postižená oblast pečlivě sledována a ošetřována.
- Pokud se změny objeví nebo zhorší, je nutné okamžitě přestat výrobek používat a kontaktovat lékaře a obchod, kde byl výrobek zakoupen.
- Výrobek nepoužívejte po aplikaci analgetických krémů a gelů.
- Nedostatečná každodenní osobní hygiena nebo nevhodná údržba výrobku (např. použití nesprávných čisticích a pracích prostředků) mohou vést k oděrkám, modřinám, popáleninám či jinému nepohodlí spojenému se zvýšeným pocením, rozvojem bakteriální flóry nebo přecitlivělostí na použité prostředky.
- V případě výskytu výše zmíněných příznaků je nutné poradit se s lékařem nebo obchodem, kde byl výrobek zakoupen.
- Je nezbytné aplikovat stejné úhly na obě dlahy a zajistit pečlivé zablokování pomocí blokovacích prvků.
- Při každodenním používání je třeba zajistit, aby dlahy nebyly poškozené, ohnuté nebo ostré.
- V případě poškození nebo závady je nutné okamžitě přestat výrobek používat a kontaktovat obchod, kde byl zakoupen, nebo výrobce.
- Opravy či úpravy svépomocí jsou zakázány.

ÚDRŽBA:

- Měkké části perte v ruce při teplotě do 40 °C v mýdlové vodě, použijte houbičku nebo měkký kartáček, nebělte, nežehlete ani nečistěte chemicky.
- Textilní a suché zipy čistěte kartáčkem a vysávejte.
- Sušte při pokojové teplotě mimo dosah intenzivního tepla.
- Při čištění plastových částí používejte měkké detergenty nebo mýdlovou vodu s hadříkem či houbičkou, opláchněte a důkladně usušte.
- Při čištění kožených částí použijte speciální přípravek na přírodní kůži, poté otřete suchým hadříkem.
- Kovové části otřete suchým hadříkem.



Zarządzenie
Jakością
ISO 9001:2008

Systematycznie monitorowany